

Notice Utilisation flacon sécurisé Alphapath



Le flacon sécurisé est composé d'un **flacon réservoir** et d'un **flacon collecteur**.

- Le **flacon réservoir** ne doit pas être ouvert.
- Le **flacon collecteur** sera ouvert pour y déposer le prélèvement



- Ouvrez le **flacon collecteur**
- Déposez le prélèvement
- **Astuce:** Pour les petits prélèvements utilisez une cassette
- Fermez le **flacon collecteur**




Vissez le **flacon réservoir** sur le bouchon du **flacon collecteur** jusqu'au point dur.

Placez vos mains afin de pouvoir libérer le fixateur en un mouvement sec et continu.



Astuce: Maintenez les flacons par le bouchon et non par le corps du flacon pour éviter toute fuite.

Astuce: Si besoin incliné le flacon à 45° et secouez le légèrement, le fixateur coulera dans le **flacon collecteur**

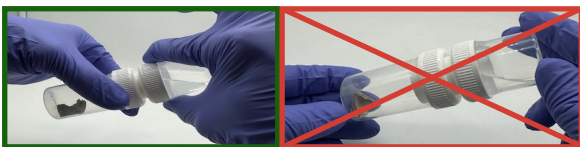

Inclinaison 45°

Astuce: Transportez avec le **flacon collecteur** vers le bas.

Ne surtout pas transporter avec le **flacon réservoir** en bas, le fixateur pourrait descendre et laisser le prélèvement à l'air.



Bon



Passable



Mauvais