



## NOTICE D'UTILISATION SafeFlowCaps 60 ml



Dispositif de fixation pour prélèvement biologique  
Flacon double compartiment (femelle/mâle)

### #1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

#### Flacon de prélèvement (flacon femelle)

Contenant un tampon incolore non toxique, operculé.



#### Flacon réservoir (flacon mâle)

Contenant du formol concentré.



Ce flacon ne doit  
**JAMAIS**  
être ouvert

### #2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



#### ÉTAPE 1 : DÉPÔT DU PRÉLÈVEMENT DANS LE FLACON FEMELLE

- 1 Retirer le bouchon du flacon femelle.
- 2 Déposer soigneusement le prélèvement biologique à l'intérieur.
- 3 Refermer le flacon avec son bouchon.



#### ÉTAPE 2 : DÉPÔT DU PRÉLÈVEMENT DANS LE FLACON FEMELLE

- 1 Enlever l'opercule du flacon femelle.
- 2 Positionner le flacon mâle **au-dessus** du flacon femelle.
- 3 Visser jusqu'au «**clac**», indiquant le perçage de la membrane interne.
- 4 Arrêter de visser **le temps que le formol coule**.

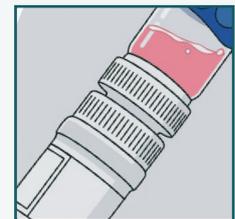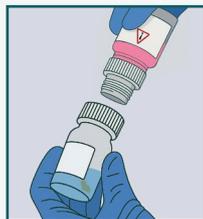

 Astuce : Faire un **quart de tour en arrière** pour bien engager le pas de vis.

 Astuce : Pencher l'ensemble à environ **45°** pour faciliter l'**écoulement du formol** dans le flacon femelle.







## #2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION


### ÉTAPE 3 : DÉPOT DU PRÉLÈVEMENT DANS LE FLACON FEMELLE

- 1** Visser à fond jusqu'à ce que les deux bouchons soient en contact, garantissant une fermeture hermétique.

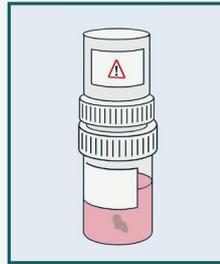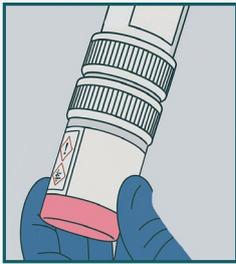


SI LE FORMOL NE S'EST PAS TOTALEMENT ÉCOULÉ SUIVRE LES POINTS 2 ET 3

- 2** Dévisser très légèrement (1/4 de tour maximum) pour permettre l'écoulement complet.

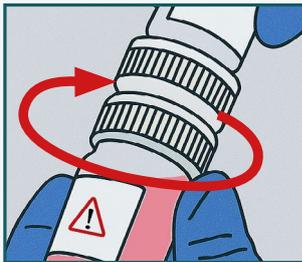

- 3** Revisser ensuite jusqu'à la butée.

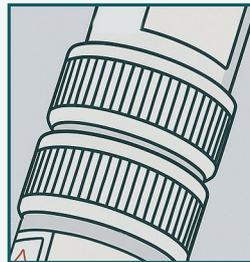

Contrôle visuel de la bonne fermeture  
Les deux bouchons doivent être en contact (vissés jusqu'à la butée).



LORS DU DÉVISSAGE TENIR LES FLACONS PAR LE BOUCHON

## #3. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1** Manipuler avec des gants. Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité liées à l'usage du formol.
- 2** Ne pas ouvrir le flacon mâle seul.
- 3** Ne pas inverser l'ordre des étapes.



Retrouvez cette notice d'utilisation sur notre [site internet](#) et en vidéo sur notre [chaîne Youtube](#)





## NOTICE D'UTILISATION SafeFlowCaps 60 ml



Dispositif de fixation pour prélèvement biologique  
Flacon double compartiment (femelle/mâle)


### #1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### APRÈS LE TRANSPORT

- 1 Afin de réduire les vapeurs de formol lors de la technique, **faire revenir le formol dans le flacon mâle** en dévissant d'**1/4 de tour** les deux flacons.
- 2 **Revissez** les deux flacons puis **retournez** les afin que le flacon femelle soit en bas.
- 3 Ouvrez le **flacon femelle** et récupérez le prélèvement.



  
**Attention à ne pas dévisser de plus d'1/4 de tour sinon cela peut provoquer une fuite.**

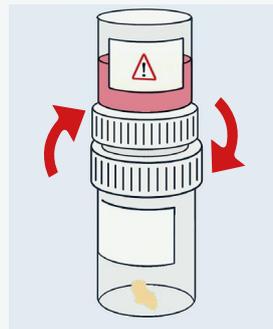

### #2. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1 Manipuler avec des **gants**. Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité liées à l'usage du **formol**.
- 2 Ne pas ouvrir le **flacon mâle** seul.
- 3 Ne pas inverser **l'ordre des étapes**.



Retrouvez cette notice d'utilisation sur notre [site internet](#) et en vidéo sur notre [chaîne Youtube](#)

