

**Flacons de Formol Acétique 4%
Personnalisés prêts à l'emploi**



Contenant :

- Flacon en Polypropylène transparent
- Bouchon à vis étanche en PE

Code EMDN : W01030705

REF	Désignation	IUD-ID de base	Code article international/GTIN
0140155	Flacon de 40 ml rempli à 15 ml de Formol Acétique 4%	3770027144ALPHAFAF40R153Y	3770027144205
0160205	Flacon de 60 ml rempli à 20 ml de Formol Acétique 4%	3770027144ALPHAFAF60R204F	3770027144199

PICTOGRAMMES

IVD	Dispositif médical de Diagnostic In Vitro
CE	Conforme aux directives Européennes
REAG	Type de produit : Réactif
CAL	Type de produit : Etalon / Standard
CONTROL	Type de produit : Contrôle
REF	Référence du produit
	Fabricant
	Ne pas réutiliser - À usage unique À utiliser uniquement une fois

LOT	N° de Lot
	Date d'Expiration
	Qsp n tests
	Limites de Température (conservation) 2°C - 8°C
	Attention, voir les instructions
	Consulter la notice
	Risques Biologiques

	Attention
	Inflammable
	Corrosif
	Toxique
	Mutagène
	Dangereux pour l'environnement

DENOMINATION DU PRODUIT

Formol tamponné Acétique 4% m/v.

UTILISATION

Fixateur de tissus organiques.
Conserve durablement les prélèvements et permet le transport dans des conditions optimums.
Produit réservé à un usage professionnel.

METHODE

Méthode de conservation des tissus par fixation chimique au Formol Acétique ^(1, 2, 3).

PRINCIPE

En bloquant l'autolyse liée à la dégradation protéique, en formant des pontages intermoléculaires et en inhibant la prolifération bactérienne, le formol Acétique conserve les tissus, ainsi que leur morphologie ^(1, 2, 3).

COMPOSITION

Formaldéhyde 4%	0.960 L
Acide Acétique	0.040 L

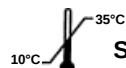
**PRÉCAUTIONS**

Avant première utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité (téléchargeable sur le site d'ALPHAPATH : www.alphapath.fr) ou sur simple demande.

Consulter également l'étiquette apposée sur le produit pour la manipulation et l'élimination du produit.

Ce produit est réservé à un usage professionnel

- Les flacons et seaux sont à usage unique. 
- Le prélèvement doit être immergé rapidement.
- Les contenants doivent être ouverts et fermés sous hotte afin d'évacuer les vapeurs de formol.
- Utiliser des moyens de protection respiratoire lors d'exposition prolongées.
- Pour une utilisation optimum, respecter la date de péremption (inscrite sur l'étiquette).
- Après la fin d'utilisation du produit, stocker dans un endroit prévu à cet effet.
- Eliminer dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.

**STABILITE / CONSERVATION**

Jusqu'à la date d'expiration figurant sur l'étiquette.
A 10-35°C dans des pièces ventilées et à l'abri de la lumière.
Ne pas réfrigérer.
Se référer à la fiche de sécurité du formol acétique 4%.

ECHANTILLONS

Pièces anatomiques fraîches immergées dès que possible, sans aucun prétraitement, dans le fixateur.
La conservation se fait à température ambiante, ne pas réfrigérer.

REACTIF DE TRAVAIL

Solution de Formol Acétique prête à l'emploi.
Eviter la contamination du fixateur.

**MODE OPERATOIRE**

Pour les bouteilles et les bidons :

Sous une hotte aspirante, ouvrir le contenant et verser du liquide jusqu'à immersion totale de la pièce.

Pour les grosses pièces anatomiques, les entailler afin de faciliter la pénétration du formol.

Pour les flacons et seaux prêts à l'emploi : 

Sélectionner le contenant le plus adapté à la pièce, sous une hotte aspirante, l'ouvrir, immerger la pièce, refermer le flacon, noter le nom du patient sur l'étiquette et remplir le bon d'examen.

Pour obtenir le meilleur résultat, le prélèvement doit être immergé rapidement dans un volume de formol acétique équivalent de 5 à 10 fois la taille du prélèvement.

Le contenant et l'échantillon doivent être conservés à température ambiante. Ne pas réfrigérer.

La durée de fixation varie suivant le volume du prélèvement.

CARACTERISTIQUES, PERFORMANCES & LIMITES

Tout prélèvement fixé dans le formol acétique est incompatible avec les techniques utilisant la congélation et le vibratome.

Le délai moyen de fixation est de 24 heures.

Pour toutes les techniques spéciales (immunohistochimie, biologie moléculaire, biochimie ...) se référer aux instructions de la technique utilisée pour connaître les performances.

BIBLIOGRAPHIE

- (1) Etude du coefficient de réduction de la taille des biopsies cutanées après fixation au formol, FAIVRE M. CRIBIER B. Les nouvelles dermatologiques ISSN 0752-5370 2002, vol 21, N°1, pp. 9-11 (22 réf.).
- (2) La fixation formolée à l'aube du troisième millénaire, PLENAT F. ; ANTUNES L. ; HALLER T. ; PIET-OUNNOUGHENE M. ; KLEIN-MONHOVEN N. ; CHAMPIGNEULLE J. za ; CHENAL P. ; BLAND V. ; GARCIAPIMENTA F. ; LABOUYRIE E. Annales de pathologie ISSN 0242-6498 CODEN ASPAD2 2001, vol 21, N° 1, pp. 29-47 (37 refs.).
- (3) The Internet Pathology Laboratory : Histotechniques <http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTOTCH/HISTOTCH.html>

Tous nos produits sont fabriqués avec la plus grande attention, cependant si vous rencontrez un problème, nous vous remercions de nous contacter au 04 67 60 74 79 en nous précisant le produit utilisé et le numéro de lot.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif fait l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

